


*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

SpecialNeeds® Feeder

Kortbruksanvisning

Viktigt

Före första användning, separera ventilmembranet från ventilplattan. Tvätta och sterilisera alla delarna, t.ex. koka i 3–5 minuter eller autoklavera. Nappen är en förbrukningsprodukt och bör bytas ut vid behov, t.ex. om mjölken flödar för fort (se "Hur flödesskåran fungerar") eller om skåran är skadad i kanterna.

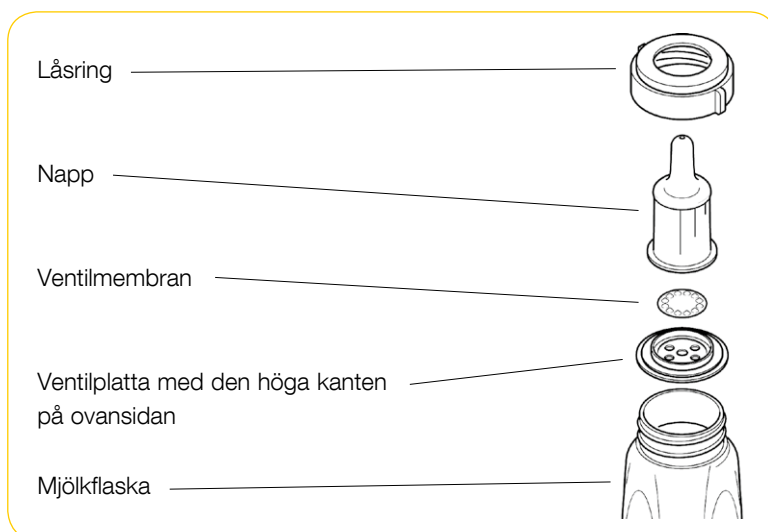


Montering av ventil och flaska

- 1 Pressa fast membranet på ventilplattan (ovansidan) så att proppen går helt igenom hålet i plattan.
- 2 Håll önskad mängd mat i flaskan.
- 3 Lägg den monterade ventilen över flaskan (se till att membranet och den höga kanten är vända uppåt).
- 4 Placera nappen på ventilplattan och skruva sedan ihop delarna med låsringen.


Fyllning av nappen

- 1 Håll flaskan upprätt och tryck ut luften ur nappen.
- 2 Håll kvar trycket och vänd flaskan upp och ned.
- 3 Släpp trycket och lite mjölk kommer ut ur nappen.
- 4 Upprepa detta flera gånger tills nappen är helt fylld.

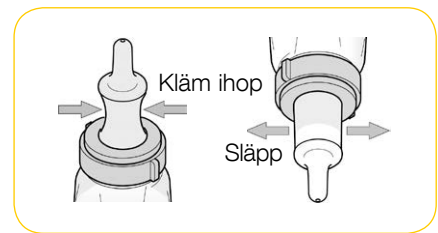


Kontroll av flödet

Nappen har en öppning med flera flödesalternativ som kan justeras för att passa barnet. Flödes hastigheterna visas av de tre linjerna på nappen, den längsta linjen för maximalt flöde, den något kortare för medelflöde, den kortaste linjen för minimalt flöde.

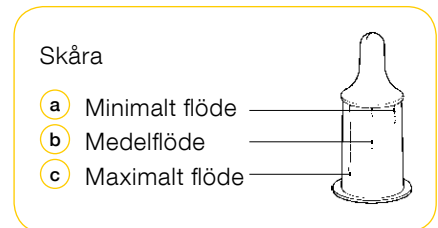

Hur flödesskåran fungerar

- a **Skåran horisontellt**
Trycket håller skåran stängd, minimalt flöde.
- b **Skåran diagonalt**
Skåran är delvis öppen och ger medelflöde.
- c **Skåran vertikalt**
Trycket öppnar skåran och ger maximalt flöde.

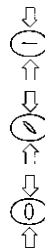

Rengöring och sterilisering

Före första användning och dagligen

Flaskans alla delar bör kokas i 5 minuter. För att reducera avlagringar (som kan påverka ventilens funktion) rekommenderar vi att man använder destillerat vatten. Alla delar kan rengöras i diskmaskin. Vid användning på sjukhus, kan alla delar autoklaveras vid 134 °C i 3 minuter eller vid 125 °C i 15 minuter.

För att undvika skador under steriliseringen, utsätt inte delarna för yttre tryck.

SpecialNeeds bör rengöras efter varje användning. Om det fortfarande finns mjölk kvar i nappen ta försiktigt bort nappen över handfatet. Demontera SpecialNeeds och se till att ventilplattan tas isär från nappen. Tvätta alla delar ordentligt i hett diskmedelsvatten och skölj med kallt vatten. Låt delarna lufttorka på en torr, ren handduk.

Obs: Denna kortbruksanvisning ersätter inte ordinarie bruksanvisning, REF 190.1059 och  0123

Local contact:

Medela Medical AB
Box 7266, 187 14 Täby
Phone 08-588 03 200
Fax 08-588 03 299

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com