

Rengöringsinstruktioner bröstpump Symphony®


1. Rengör bröstpumpen genom att torka av den med en ren, fuktig (inte blöt) trasa/hushållspapper med kranvatten och vanligt diskmedel eller ett icke frätande rengöringsmedel.



2. Rengör kort- och sladdskyddet Lossa skruven och skjut skyddet uppåt. Följ samma rengöringsinstruktion som under punkt 1.



3. Rengör även programkort, nätsladd, väska (in- och utvändigt) samt flaskställ om det finns ett sådant i väskan.

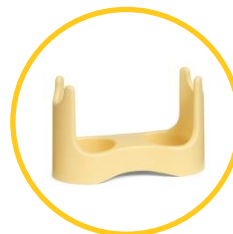

4. Öppna locket på bröstpumpen Tryck på den ovala knappen uppe på pumpen och lyft handtaget. Plocka bort pumpsetdelar om de sitter kvar. Torka av ovanpå, under locket samt torka av pumpmembranerna.



Denna instruktion ersätter inte ordinarie bruksanvisning (REF 201.0525)

medela.se/uthyrning